

Kørestols-/platformsvægt - M-615



Denne letvægts kørestolsvægt består af to letvægtsbjælker og en indikator til at aflæse vægten, hver bjælke er forbundet med en række hængsler og har et indbygget håndtag.

Vægten er designet til at være yderst bærbar og nem at transportere.

Den er utrolig let at bruge - du skal blot åbne bjælkerne, lægge dem fladt, tilslutte indikatoren, og du er klar til at veje din patient.

Velegnet til de fleste kørestole.

Udstyret med en TARE/Preset TARE funktion, så kørestolens vægt kan fratrækkes inden vejning.

Vægten har HOLD-funktion: Når en patient ikke står eller sidder fuldstændig stille, vil en stabil vægt blive udregnet ved hjælp af en gennemsnitsvægt og denne bliver herefter frosset. Dette betyder, at der er tid til at fokusere på patienten og dernæst aflæse vægten i god ro og orden.

Er derudover forsynet med en BMI funktion, så undervægt, normalvægt eller overvægt kan fastslås.

Den kan belastes helt op til 300 kg i intervaller på 100 g og har et genopladeligt batteri, der giver 55 timers kontinuerligt brug fra fuld opladning.

Den har Auto power-off funktion, som hjælper med til at spare på batteriet, samt let læseligt display.

Den er Klasse III godkendt.

Det er muligt at tilvælge Bluetooth- eller Wi-Fi-forbindelse, så I kan sende patientdata til en central database - oplys herom v/bestilling.

Praktisk bæretaske kan tilkøbes.

Tekniske specifikationer:

Mål, foldet: 100 x 39,4 x 12,2 cm (L/B/H)

Mål, udfoldet: 100 x 87,7 x 6,4 cm (L/B/H)

Mål på vejeområde: 74 x 20 cm (L/B)

Nøjagtighed: 100 gram

Nettovægt: 9,8 kg

Maks. belastning: 300 kg

Varenummer	Beskrivelse	HMI-nr.	Belastning
43M615	Kørestolsvægt, foldefunktion, Transportabel, M-615	131137	300 kg
43CC615	Bæretaske		
43M-BT	Bluetooth funktion		
43M-WIFI	Wi-Fi funktion		