



Terapeutskammel FISK

Scan-Med a|s

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand
Tlf. 86 10 61 66
www.scan-med.dk | e-mail: scan-med@scan-med.dk

BRUGSANVISNING FOR Terapeuticskammel FISK

Varenr. 290422 HMI-nr. 22492

Højdeindstilling af sæde:

- a. Placér Dem i siddestilling på skamlen.
- b. Grib fat om gasfjederens udløserarm (**A**), som sidder i højre side lige under det polstrede sæde.
- c. Træk opad i udløserarmen - hermed udløses låsen på gasfjederen.
- d. Ønsker De **sædehøjden øget**, let presset af deres vægt på sædet, indtil den ønskede sædehøjde nås. Slip derefter udløserarmen.
- e. Ønsker De **sædehøjden reduceret**, øg presset af Deres vægt på sædet, indtil den ønskede højde nås. Slip derefter udløserarmen.

VEDLIGEHOLDELSE:

- Efterse jævnligt sæde og dets fastspænding.
- Hjulene checkes regelmæssigt og efterspændes om nødvendigt. De skal holdes fri af hår for at bevare deres maksimale køreevne.
- Udskift slidte eller ødelagte dele:
Hellere én gang for meget end én gang for lidt !
- Rengøring foretages med almindelige ikke-ætsende rengøringsmidler.

Produktdata:

Sædelængde:
52 cm

Sædebredde (maks.):
32 cm

Højdejustering:
41 - 55 cm

Maks. belastning:
150 kg

Scan-Med a|s

Scan-Med A/S • Dalgårdsvej 17 • 8220 Brabrand
Tlf. 86 10 61 66
www.scan-med.dk | e-mail: scan-med@scan-med.dk